

Dane Techniczne:

PARAMETR:	AR-201	AR-201A	AR-202	AR-203	AR-204	AR-205	AR-208	AR-209
Rama:	alumiowa	alumiowa	alumiowa	alumiowa	stalowa	alumiowa	alumiowa	alumiowa
Kolor ramy:	srebrny	srebrny / szary	srebrny	srebrny	biały	srebrny	srebrny	srebrny
Typ/model	stały	stały	stały	stały	składany	składany	stały	stały
Szerokość siedziska:	33 cm okrągłe	33 cm okrągłe	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	48 cm	41 cm
Głębokość siedziska:	33 cm okrągłe	33 cm okrągłe	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	33 cm	48 cm
Regulacja wysokości	38-56 cm	37-52 cm	36-47cm	36-47 cm	52 cm	47-50,5 cm	36-53 cm	35-45 cm
Waga produktu:	1,5 kg	1,9 kg	1,8 kg	3,0 kg	3,2 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,1 kg
Maksymalne obciążenie:	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg

SYMBOLE:								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

**KARTA GWARANCYJNA**  
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr kat. produktu / Nr LOT	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12- miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów z polietylenu i gumowych (tj. ścieranie się nasadek gumowych (5)).
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania krzesła/taboretu prysznicowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. **Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**KARTA GWARANCYJNA**

**KRZESŁA I TABORETY PRYSZNICOWE**



- AR-202 Krzesło prysznicowe bez oparcia
- AR-203 Krzesło prysznicowe z oparciem
- AR-208 Krzesło prysznicowe z wycięciem U
- AR-201A Taboret prysznicowy okrągły - obrotowy

- AR-201 Taboret prysznicowy - okrągły
- AR-204 Taboret prysznicowy - składany
- AR-205 Taboret prysznicowy - składany
- AR-209 Taboret prysznicowy z wycięciem U

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**  
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111  
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





## INSTRUKCJA OBSŁUGI - KRZESŁA I TABORETY PRYSZNICOWE

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

### Przeznaczenie wyrobu:

Krzesła oraz taborety prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których, ze względów zdrowotnych standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwiają i pomagają podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabine prysznicowej.



### Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrób bez nadzoru opiekuna.

### Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z produktu – 110 kg



### Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki są proste, nie nadłamane (np. w transporcie), czy opakowaniu znajdują się wszystkie elementy składowe wyrobu.
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z polietylenu nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy wszystkie nogi krzesła/taboretu ustawione są na tej samej wysokości. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209)
4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe antypoślizgowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone.



### W celu uniknięcia urazów:

1. Wszystkie elementy z polietylenu muszą być solidnie i trwale przymocowane (za pomocą dołączonych śrub) z nogami oraz oparciem (dot. modelu AR-203, AR-208)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących, rurek ramy wyrobu oraz nasadek gumowych)
3. Wszystkie nogi krzesła/taboretu prysznicowego muszą być ustawione na tej samej wysokości. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209)
4. Używać tylko na płaskim, twardym podłożu uniemożliwiającym przesunięcie się krzesła podczas siadania
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni pomimo antypoślizgowych nasadek
6. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło / taboret (m.in. wskakiwania)
7. Zabrania się przenoszenia krzesła / taboretu wraz z użytkownikiem
8. Zabrania się stawiania obuwem na siedzisku oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
9. Nie wolno przeciążać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez Producenta.
10. Zaleca się aby przed użytkowaniem wyrobu śliskie powierzchnie wyłożone były matami antypoślizgowymi (np. kabina prysznicowa)

### Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie wypłukać czystą wodą (nie pozostawiać na wyrobie mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp.) a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania do czyszczenia mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny, suszenia) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych krzesła/taboretu a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy gumowe antypoślizgowe, (nasadki na nogi) (5) są elementem zużywalnym i muszą być regularnie wymieniane na nowe.

### Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

#### I. Krzesło / taboret prysznicowy nie jest stabilny/.

- a. Czy wszystkie nogi krzesła/taboretu są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe (5)? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe (5) są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je wcisnąć.
- d. Czy wyrób ma stabilnie przykręcone elementy z polietylenu do ramy (1) (dołączonymi śrubami)? Jeśli nie, wszystkie śruby należy ponownie mocno dokręcić. Wszystkie elementy wyrobów należy skrócić/złożyć w taki sposób aby po zakończeniu czynności stanowiły dokładne odwzorowanie zdjęcia wyrobu ze strony 1 (dot. wszystkich modeli)
- e. Pomimo solidnego dokręcenia wszystkich śrub montażowych wyrób nadal nie jest stabilny? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ KRZESŁA/TABORETU PRZYSZNICOWEGO!!!

### Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

### Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

### Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

## ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



1. Rama aluminiowa  
(Rama stalowa: dot. model AR-204)
2. Siedzisko polietylenowe  
(kształt zależny od modelu)
3. Oparcie polietylenowe  
(dotyczy modelu AR-203, AR-208)
4. Regulacja wysokości nóg  
(dotyczy modelu AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209)
5. Nasadki gumowe antypoślizgowe

### Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć krzesło/taboret prysznicowy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Położyć na podłodze lub twardej powierzchni siedzisko (2) tak aby widoczna była część spodnia. Chwyć elementy ramy aluminiowej (1) (stalowej dot. modelu AR-204) i ustaw je nasadkami gumowymi ku górze (5), w taki sposób aby otwory w elementach ramy i siedziska pokrywały się wzajemnie. Wkręć wszystkie dołączone śruby w istniejące otwory, palcami - jeśli zastosowano śruby plastikowymi motylkami. Dot. modelu AR-203, AR-208: po zmontowaniu siedziska i ramy aluminiowej (nóg) należy przykręcić oparcie(3). Postępować należy jak przy montażu siedziska i ramy aluminiowej. **UWAGA! Wszystkie śruby muszą być mocno dokręcone co gwarantuje bezpieczne użytkowanie wyrobu.**
4. Należy dopasować wysokość nóg krzesła/taboretu prysznicowego (dot. modelu: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209) do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wcisnąć główkę zatrzasku (4) znajdującego się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie rurki wymaganą wysokość. Główka zatrzasku musi wskoczyć w otwór na żądaną wysokość! Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg. Główka zatrzasku we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości.

**Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.**

### Zakończenie użytkowania:

1. Złóż taboret prysznicowy dot. modelu AR-204, AR-205

### Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw krzesło/taboret prysznicowe/y w miejscu gdzie nie będzie narażone/y na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

**DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU**